

Anzeige Längenmessung

· Differenz von Fußlänge und Schuhgröße in Millimetern

Anzeige Breitenmessung

· Differenz von Fußbreite und Schuhweite in Millimetern

Vier verschiedene Symbole zeigen wie der Schuh passt:



12 - 16 mm
Platz

**Schuh passt
perfekt**


für neue Schuhe ideal



6 - 12 mm
Platz

**Schuh wird zu
klein**

bei Schuhen im
Gebrauch in Ordnung

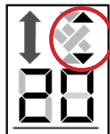

mehr als 16 mm
Platz

Schuh ist zu groß

viel zu große Schuhe,
nicht tragen



unter 6 mm
Platz

Schuh ist zu klein

Schuhe schnellst-
möglich wechseln

Kurzanleitung Orthopädisches Kinderfuß- und Schuhmessgerät



CLEVERMESS

...der clevere Weg zum passenden Schuh!



1. Gerät anschalten. Ein Piepton ertönt.



2. Ab Schuhgröße 31 Verlängerung anstecken. Zehen- und Fersenanschlag aufstecken.



3. Durch Drücken der seitlichen Knöpfe das Messgerät auf ungefähre Fußlänge auseinander ziehen.



4. Kinderfuß gerade & fest auf das Messgerät stellen. Längeneinstellung ggf. anpassen, so dass Fersen- und Zehenschlag exakt am Fuß anliegen.

5. Breitenklammer über dem Fuß in die seitlichen Ausparungen stecken, oben zusammenführen.



6. Breitenklammer auf Breite des Fußes zusammendrücken, zum Speichern zusätzlich die vordere Messzunge eindrücken bis zwei Pieptöne ertönen.



7. Display blinkt (es zeigt nicht die gemessene Größe!). Ansteckteile entfernen, Messgerät in den Schuh stecken. Wenn die Messung erfolgt ist, piept das Gerät dreimal. Das Ergebnis wird für 40 Sekunden angezeigt.



8. Nach dem Löschtton (fünfmal kurz) kann einfach ein neuer Schuh vermessen werden. Nach der Anwendung Gerät ausschalten.

